

## Hansen-tukivyö leikkausohje

### Hansen-tukivyö – 18 cm leveä



Aseta vyö avanteesi päälle harmaa puoli ylöspäin. Merkitse kynällä kohta, johon reikä avannepussille leikataan. Tarkista, että reikä tulee keskelle vyötä (korkeussuunnassa). Reiän tulee olla vähintään 7 cm vyön reunasta.

Taita vyö kuten kuvassa ja tee 2 cm viilto. Reiän halkaisijaksi tulee näin 4 cm.

\*



Aseta vyö pöydälle ja leikkaa halutun kokoinen **soikea** reikä pystysuuntaisesti. Varo leikkaamasta liian suurta reikää.

#### **ÄLÄ LEIKKAA PYÖREÄÄ REIKÄÄ.**

Reikä venyy helposti liian suureksi, jos se on pyöreän muotoinen. Reiän tulee olla soikea.



\*



Voit kokeilla reiän kokoa sovittamalla avannesidostasi siitä läpi.

\*



Vyötä voi myös muotoilla reunoilta kapeammaksi niin halutessaan. Suosittelemme, että piirrät leikattavan alueen ensin vyöhön ja leikkaat vasta sitten. Huomioithan, että vyön täytyy olla min. 15 cm leveä kapeimmillaan.